


Travixx Classic

Drawing number: 2410A.01
Issue date: 28-02-2018
Version: 01

Complete

WWW.VANOSMEDICAL.COM

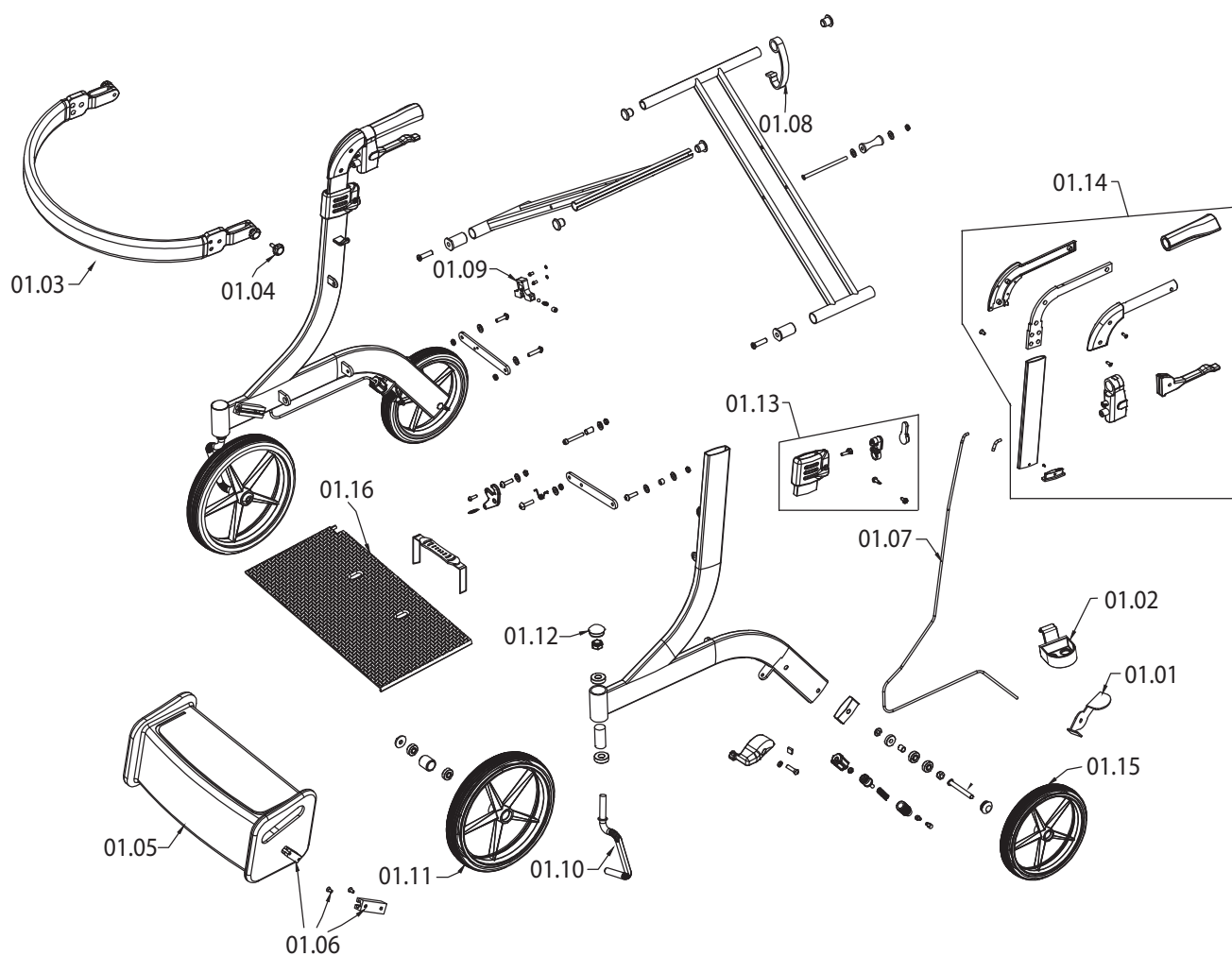

Onderdelenlijst Travixx Classic

WWW.VANOSMEDICAL.COM

Accessories

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs	Tekening	Nummer	Batch
9241 7120	Stepper incl bevestigingsmateriaal per paar	€ 39,10	2410A.01	01.01	3955
9241 7125	Stokkenhouder en stokkenklem	€ 20,13	2410A.01	01.02	3955

Backrest strap

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs	Tekening	Nummer	Batch
9241 5200	Rugband smal inclusief afneembare hoes	€ 69,00	2410A.01	01.03	3955
9241 5205	sterknop grijs tbv rugband	€ 5,75	2410A.01	01.04	3955

Bag

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs	Tekening	Nummer	Batch
9241 9900	Tas Travixx	€ 24,95	2410.08/24	08.01/01.05	3050
9242 9950	Bevestigingsblok (set van 2) tbv montage tas	€ 4,72	2410A.01	01.06	-

Brake

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs	Tekening	Nummer	Batch
9241 7100	Remkabel tbv Travixx Small (set van 2 kabels, 1x binnen- en 1x buitenkabel)	€ 34,50	2410A.01	01.07	3955
9241 7105	Remkabel tbv Travixx Medium (set van 2 kabels, 1x binnen- en 1x buitenkabel)	€ 34,50	2410A.01	01.07	3955

Crossframe

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs	Tekening	Nummer	Batch
9241 9100	Transport vergrendelingshendel (grijs)	€ 20,13	2410A.01	01.08	3955
9241 9500	Parkeerlock aluminium, nastelbaar rood	€ 20,13	2410A.01	01.09	3955

Front castor

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs	Tekening	Nummer	Batch
8241 0150	Voorvork LINKS Zwart (dun)	€ 56,35	2410.03/24	03.02/01.10	3050
8241 0155	Voorvork RECHTS Zwart (dun)	€ 56,35	2410.03/24	03.02/01.10	3050
8241 1100	Voorwiel (groot) zwarte spaken	€ 40,25	2410A.01	01.11	3955
9241 7035	Balhoofd afdekdoppen, set van 2	€ 5,75	2410.03/24	03.03/01.12	3050

Push handle

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs	Tekening	Nummer	Batch
9241 7140	Vergrendelmechanisme tbv hoogte instelbare duwhandvatten met grijze drukknop (nastelbaar)	€ 20,13	2410A.01	01.13	3955
9241 7200	Handvat en remhandvat (grijs) LINKS	€ 28,18	2410A.01	01.14	3955
9241 7205	Handvat en remhandvat (grijs) RECHTS	€ 28,18	2410A.01	01.14	3955

Rear wheel

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs	Tekening	Nummer	Batch
4241 1100	Achterwiel (klein) zwarte spaken	€ 34,50	2410A.01	01.15	2955

Seat

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs	Tekening	Nummer	Batch
5241 1100	Wire Mesh zitting lichtgewicht	€ 74,75	2410A.01	01.16	3955